

Face Shield

[メガネ] MOVE+



可動式シールドで装着したまま水分補給が可能。
 圧迫感も少なく、汗ばみや熱気もしっかり回避。

※こちらの画像はフルサイズを使用しています。

大きなシールドで飛沫をブロック



シールドサイズ
FULL
タイプ

商品名	フェイスシールドメガネ ムーブプラス フル 10枚
商品番号	FGF-10
材質	メガネ:PC ビス:PC シールド:PET シールド保護フィルム:PE
希望小売価格/入数	3,600円(税別)/10枚



メガネタイプで着脱が簡単・ヘアスタイルも崩れにくい




視界がはっきり
透明度の高い素材
 透明度の高いPET素材で、視界がはっきり見えます。




繰り返し使用可能
衛生的 & 経済的
 樹脂製なので超軽量。直接洗浄でき、繰り返し使用可能なため、衛生的&経済的です。



顔を大きく覆い
飛沫をブロック
様々な衛生現場に
 顔全体を樹脂シールドで覆い、飛沫をブロックします。

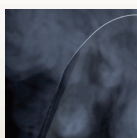

曇り止めコーティング
作業をスムーズに
 曇り止めコーティングで、息で曇りにくくしています。
 ※コーティングは永久ではありません。

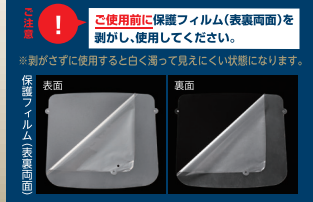

ご使用前に保護フィルム(表裏両面)を剥がし、使用してください。
 ※剥がさずに使用すると白く濁って見えにくい状態になります。
 保護フィルム(裏面)

シールド取り付け手順

1 シールド左右にジョイントパーツをつけます。穴は少し小さめになっていますので強く押し込んでください。※使用中に外れなくするためにピンは固くなっています。



2 ジョイントをフレームの穴に入れます。2つある突起のうちシールドのついている方を前の穴に入れます。こちらも穴が少し小さめになっていますので、片側ずつ交互に少しずつ押し込みます。※手で差し込めない時はペンチなどご使用下さい。



3 しっかり最後まで押し込みます。




4 完成です。



シールドの取り外し方

ジョイントパーツとフレームの隙間にマイナスドライバーなどを入れ、徐々に外していきます。

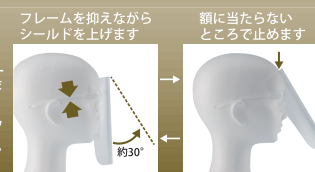

フレームを抑えながらシールドを上げます
 顔を当たらないところで止めます
 約30°

程よいシールドサイズでマスクとの併用にも最適。



シールドサイズ
HALF
タイプ

商品名	フェイスシールドメガネ ムーブプラス ハーフ 10枚
商品番号	FGH-10
材質	メガネ:PC ビス:PC シールド:PET シールド保護フィルム:PE
希望小売価格/入数	3,200円(税別)/10枚



洗浄・クリーニングについて

清潔を保つためにこまめに中性洗剤などで洗浄してください。アルコールなどの薬品でも消毒できますが、素材を劣化させる恐れがございます。

注意

- アルコールなど薬品での洗浄は、素材を劣化させる恐れがあります。
- 過度な衝撃や折り曲げを受けた場合は破損することがあります。
- 直射日光、高温な場所での保管は避けてください。
- 幼児の手の届かない場所で保管してください。
- 息や飛沫を完全に遮断することはできません。


シールドの上げ方・下げ方

フレームを抑えながら、シールドの下部をつまみ、上げます(約30°)。上げ過ぎるとシールドが顔にあたります。同じ要領で、フレームを抑えながら、シールド下部をつまみ、下げます。シールドが顔と平行になったあたりで止めます。


※シールド部分のみの交換も可能です。

別売交換シールド

※フレームは共通です。フル、ハーフ、どちらにもご使用になれます。

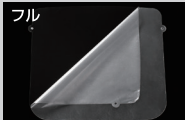

商品名	フェイスシールドメガネ 替えシールド フル 10枚
商品番号	FGF-S10
材質	シールド:PET シールド保護フィルム:PE
希望小売価格/入数	1,600円(税別)/10枚

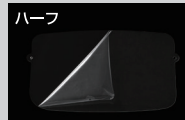

商品名	フェイスシールドメガネ 替えシールド ハーフ 10枚
商品番号	FGH-S10
材質	シールド:PET シールド保護フィルム:PE
希望小売価格/入数	1,200円(税別)/10枚